



medi

medi Armschlinge

**Schulterimmobilisationsorthese · Shoulder joint support
Écharpe d'immobilisation d'épaule · Cabestrillo
inmovilizador de hombro**

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi. Instrucciones de uso.
Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso. Gebruiksaanwijzing.
Brugsvejledning. Bruksanvisning. Návod k použití. Uputa za uporabu.
Инструкция по использованию. Gyinme kılavuzu. Instrukcja zakładania. Οδηγία
εφαρμογής. Használati útmutató. Інструкція з використання. Návod na použitie.
使用说明. Instrucțiuni de utilizare.

medi. I feel better.



Abb. 1



Abb. 4



Abb. 2



Abb. 5



Abb. 3

medi Armschlinge

Назначение

Отводящая шина medi Armschlinge может быть использована только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Иммобилизация после операций на плечевом суставе и плече
- Вывих плеча

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены. Следует проконсультироваться у врача перед применением изделия в следующих случаях:

- Повреждения кожи в области соприкосновения с изделием, особенно в случае наличия признаков воспаления (повышенная температура, опухоль или покраснение).
- Нарушения чувствительности или кровоснабжения предплечья или кисти.
- При необходимости совместного применения с компрессионным рукавом Вам следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Рекомендации по использованию

Если при пользовании изделием у Вас возникли боль или неприятные ощущения, пожалуйста, немедленно снимите его и проконсультируйтесь у Вашего врача.

Рекомендации по надеванию

- Расстегните застёжки-липучки и положите руку в поддерживающую часть бандажа. рис. 1
- Протяните плечевой ремень за спиной, перекиньте через здоровое плечо и зафиксируйте застёжкой-липучкой на поддерживающей части бандажа. рис. 2+3
- Оберните поясной ремень вокруг тела и зафиксируйте застёжкой-липучкой на поддерживающей части бандажа. рис. 4

Поддерживающая часть бандажа индивидуально моделируется под необходимую длину предплечья при помощи застёжки-липучки. рис. 5

Рекомендации по уходу

Перед стиркой застегните застёжку-липучку. Остатки мыла могут вызвать раздражение кожи и способствовать износу материала.

- Стирайте изделие вручную предпочтительно с использованием моющего средства medi clean или в шадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушите на воздухе.
- Не гладьте.
- Не подвергать химической чистке.



Состав

Хлопок, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством, действующим на территории страны-импортера.

Ответственность

При использовании изделия не по назначению производитель не несет никакой ответственности. Также соблюдайте указания по безопасности и предписания, приведенные в этой инструкции.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!